

«АЛЬФА-ДЕНТ» (ALPHA-DENT) – КОМПОЗИТНЫЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА СМОЛЯНОЙ ОСНОВЕ, С ХИМИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ.

Сертифицирован ADA(Американской стоматологической ассоциацией)

«Альфа-дент» - композитный восстановительный материал на смоляной основе, с химической полимеризацией, содержит 63 % по объему смесь неорганических радио-непроницаемых наполнителей с размерами частиц от 0,04 до 15 микрон. Олигомер органической матрицы основывается на смоле Bis-GMA. Рекомендуется для восстановлений 3-го и 5-го класса и для органического применения в восстановлении 1-го класса пре-моляров, и некоторых восстановлений 4-го класса, где эстетика имеет большое значение. Выпускается в одном универсальном оттенке, который оптимально подходит для восстановлений и структуры, окружающей зуб.

Инструкции по применению:

1. Подготовьте зуб. Тщательно изолируйте и высушите зуб.
2. Нанесите протравливающее средство на подготовленный зуб. Эмаль протравливается 15 секунд; если протравливающее средство наносится на дентин, то протравливание длится 10 секунд. Никогда не оставляйте протравливающее средство на зубе более 60 секунд. Легкое перемешивание протравливающего средства во время его нанесения усиливает его действие.
3. Тщательно промойте водой и полностью высушите зуб.
4. Если применяется связывающая смола с химической полимеризацией «Альфа-дент®», используйте равные объемы, одну или две капли катализатора и основы «Альфа-дент®», на смешивающем столике или другой пригодной поверхности. Тщательно перемешайте 5-10 секунд. Хорошо смочите наконечник щеточки, и обильно нанесите однородным слоем на протравленный зуб. Связывающая смола с химической полимеризацией «Альфа-дент®» будет затвердевать в течение 45 секунд после начала перемешивания. Через 45 секунд можно наносить композитный восстановительный материал с химической полимеризацией «Альфа-дент®» на связывающую смолу с химической полимеризацией, не дожидаясь полного затвердевания смолы. Связывающая смола с химической полимеризацией «Альфа-дент®» полностью затвердевает через 2 минуты после начала смешивания. (При применении связывающей смолы с химической полимеризацией другого производителя соблюдайте инструкции).
5. Нанесите равные объемы основной пасты и пасты-катализатора на смешивающий столик. Тщательно перемешайте пасты шпателем до образования однородной массы.
6. В полость нанесите несколько больше смешанного композитного материала, чем требуется, используя для этого неметаллический инструмент. Композитный материал будет затвердевать в течение 2 минут после начала смешивания. В это время к нему не следует прикасаться. Полное затвердевание наступает еще через 2 минуты.
7. Через 6 минут с начала смешивания можно начинать обработку и полировку с помощью алмазных, карборундовых или твердосплавных боров со стандартной скоростью. Композитный поверхностный герметик можно также использовать для улучшения поверхности, для заполнения микротрещин на обработанной композитной поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Избегайте контакта протравливающего средства с мягкой тканью, глазами и кожей. Протравливающее средство «Альфа-дент®» содержит фосфорную кислоту, которая представляет опасность. В случае попадания на мягкую ткань, глаза или кожу немедленно смойте водой и немедленно обращайтесь за соответствующей медицинской помощью.
- Рекомендуется охлаждение. Хранить при температурах от 10°C/50°F до 24°C/75°F. Не замораживать. Перед использованием довести до комнатной температуры 22°C/72°F.
- Не храните вблизи материалов на основе эвгенола; может не произойти полная полимеризация.
- Избегайте перекрестного загрязнения паст. Присутствие одной пасты в другой приведет к их затвердеванию в емкости.
- Шпатель для перемешивания используйте только один раз. Использованный шпатель является источником загрязнения.
- Емкости с пастами должны быть всегда закрыты.