

Инструкция по применению

PMMA Disk

- Область применения: зубная коронка и мост
- Основные компоненты: полиметилметакрилат, углерод, диоксид титана, оксид железа
- Неорганический наполнитель: 0%
- Способ подготовки поверхности металла: не применяется
- Выбор оттенка: <Светлый> Прозрачный - B1- A1- B2- D2- A2- C1- C2- D4- A3- D3- B3- A3.5- B4- C3- A4- C4 <Темный>
- Условия смешивания: не применимо
- Время работы: не применимо
- Время схватывания: не применимо

Процесс работы с PMMA Диском

(1) Коронка и Мост

- Фрезеровка на машине CAD / CAM.
*Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации машины CAD / CAM.
- Обработка и полировка обычным способом.

Процедура обработки и полировки:

1. Используйте твердосплавный бор для грубой отделки.
2. Используйте силиконовую полир для средней полировки.
3. Используйте полирующее оборудование с полировочной щеткой.

Побочные эффекты:

Существует вероятность появления симптомов аллергии, таких как сыпь и дерматит, при использовании этого продукта.

Условия хранения:

- Держать подальше от огня.
- Разместите огнетушитель как в мастерской, так и в зоне хранения.
- Пожалуйста, храните в темном и прохладном месте, где использование огня строго запрещено. Хранение большого количества материала в одном месте не рекомендуется.

Примечания

- Не используйте для пациентов, которые испытали гиперчувствительность, например, сыпь или дерматит к этому материалу.
- Если у пациента проявляется симптом повышенной чувствительности, немедленно прекратите использование материала и немедленно обратитесь к врачу.
- Хорошо проветривайте во время работы.
- Пожалуйста, погрузите отвержденную основу для протезов в воду и дайте оставшемуся мономеру вытечь перед тем как поместить ее в рот.
- Не используйте для других целей, кроме указанных в руководстве.

Произведено

YAMAHACHI DENTAL MFG., CO., Япония

54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori-city, Aichi-pref., 443-0105, Япония

Tel: (+81) 503-57-7 1 21 I F ax'. (+81) 533-57-1 764

E-mail: box@yamahachi-dsntal @ jp;

Web: w.yamahachi-dantal co jp



1639

Только для одноразового
использования