

## **Инструкция по применению**

### **Efucera NS**

1. **Изготовление протеза:** это зависит от обычного метода изготовления.

2. **Метод полировки:** полировка выполняется в абразиве, который представляет собой алмазную пасту, с использованием щетки и ткани и т.д.

#### **[Внимание]**

1. Зубы не прилипают к пластмассе для зубного протеза, за исключением акриловой пластмассы порошкового и жидкого типа. Поэтому предварительно обработайте их в соответствии со способом, назначенным изготовителем пластмассы для основы зубного протеза.

2. Не используйте сильно щелочные (больше, чем pH10) материалы для растворения гипса и чистящие средства для зубных протезов вокруг зубов из композитной смолы. Зубы из композитной смолы могут быть мутными. Для материалов, растворяющих гипс, рекомендуется «Перерыв (YAMANACHI DENTAL)».

3. При удалении грязи наносите песок для полировки и шлифуйте зубной щеткой. Затем наносится оксид цинка и полируется щеткой пуховкой.

4. Не делайте временную фиксацию зубов с помощью суперклея на основе цианоакрилата. При извлечении зубного протеза после полимеризации поверхность пластмассовых зубов может быть оторвана или сломана.

5. После заточки пластмассовых зубов для коррекции формы отполируйте их.

6. Чтобы избежать вдыхания пыли, всегда используйте маску и пылесборник при полировке.

#### **[важная заметка]**

1. Если у пациента проявились какие-либо симптомы повышенной чувствительности, прекратите использование материала и немедленно обратитесь к врачу.

2. Если у лаборанта обнаружены какие-либо симптомы повышенной чувствительности, прекратите использование материала и немедленно обратитесь к врачу.

3. Не используйте для пациентов, которые ранее испытывали любую гиперчувствительность, такую как сыпь или дерматит и зуд с метакриловым мономером.

4. Лаборантам, которые ранее испытывали любую гиперчувствительность, такую как сыпь или дерматит и зуд к метакриловому мономеру, рекомендуется использовать перчатки и не прикасаться к материалу напрямую.

#### **[Условия хранения]**

- Хранить в прохладном месте (1 - 30 ° C) вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

- Хранить в недоступном для не стоматологов месте. Держать под постоянным наблюдением

- Не храните продукты в больших количествах.
- Разместите огнетушитель как в мастерской, так и в зоне хранения.

**[Потенциальная опасность]**

Этот продукт может вызвать аллергические реакции, такие как сыпь и дерматит.

**Произведено**

**YAMAHACHI DENTAL MFG., CO., Япония**  
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori-city, Aichi-pref., 443-0105, Япония  
Tel: ( +81 ) 503-57-7 1 21 I F ax'. (+81) 533-57-1 764  
E-mail: box@yamahachi-dsntal @ jp;  
Web: w.yamahachi-dantal co jp



**1639**

Только для одноразового  
использования