

DiaPlus инструкция по применению

Описание

DiaPlus™ представляет собой адгезив для дентина и эмали фотополимеризационного типа, представляющий собой систему адгезии дентина 5-го поколения, которая может применяться ко всем типам реставраций из композита.

Предполагаемое использование

Как система тотального травления дентина и эмали для прямой адгезии, она используется для адгезии реставрационных материалов любого направления.

Состав

- Этиловый спирт/диметакрилат уретана/бисфенол-А-глицидилметакрилат/моно-2-(метакрилоилокси) этилсукцинат/добавки

Применение

- Прямая адгезия композита
- Адгезия композита к существующей амальгамной реставрации
- Адгезия непрямой реставрации - фарфор, композит (вкладки, накладки, виниры, коронки)
- Герметизация участков зубов повышенной чувствительности

Способ использования

А. Подготовка к использованию

- 1} Перед использованием продукта проверьте ненормальное состояние продукта, включая срок годности, наличие инородных тел и примесей, деформацию (не используйте затвердевшие) и т.д.
- 2} Соблюдайте методику нанесения, предварительно ознакомившись с руководством пользователя производителя.
- 3} Снимите защитный колпачок и подготовьте устройство к использованию.
- 4} Защитите полость рта коффердамом.

Б. Рекомендуемая процедура

[Прямая адгезия композита]

1. Тщательно очистите поврежденный участок зуба пемзой и водой. При обнажении пульпы зуба выполнить закрытие пульпы гидроксидом кальция и стеклоиономером в соответствии с указаниями.
2. После кислотной обработки эмали и дентина с помощью средства для травления зубов кислотой (DiaEtch) смойте гель для травления водой и осторожно высушите их в течение 1-2 секунд, чтобы удалить излишнюю влагу с области процедуры. В это время не забудьте оставить небольшое количество влаги на области процедуры. (Сушите зубы только до слегка влажного состояния, чтобы избежать чрезмерного высыхания, так как это может стать причиной снижения прочности сцепления).
3. Нанесите 2 капли бонда DiaPlus в емкость для смешивания и смочите кончик кисти достаточным количеством бонда, чтобы дважды покрыть зону процедуры, и подождите 10 секунд после нанесения. Слегка просушите в течение 2~5 секунд, чтобы испарился летучий растворитель (если на поверхности зоны процедуры нет блеска, нанесите бонд, повторяя вышеуказанные процедуры), прежде чем засвечивать в течение 20 секунд.
4. Отреставрировать и отшлифовать в зоне процедуры в соответствии с руководством пользователя применяемого реставрационного материала.

[Адгезия композита к существующей реставрации из амальгамы]

1. Изолируйте обрабатываемую область с помощью коффердама.
2. Придайте шероховатость поверхности существующей амальгамы или композита, используя бор, алмазный или пескоструйный аппарат.

3. После обработки эмали и дентина стоматологической кислотой (DiaEtch) смойте протравливающий гель водой и осторожно высушите их в течение 1-2 секунд. В это время не забудьте оставить небольшое количество влаги на области процедуры. (Сушите зубы только до слегка влажного состояния, чтобы избежать чрезмерного высыхания, так как это может стать причиной снижения прочности сцепления.)
4. Нанесите 2 капли бонда DiaPlus в емкость для смешивания и смочите кончик кисти достаточным количеством адгезива, чтобы дважды покрыть область процедуры, и подождите 10 секунд после нанесения.
Слегка просушите в течение 2 ~ 5 секунд, чтобы испарился летучий растворитель (если на поверхности зоны процедуры нет блеска, нанесите бонд, повторяя вышеуказанные процедуры), прежде чем светоотверждать в течение 20 секунд.
5. В случае затвердевшей существующей амальгамы тонко нанесите кистью соответствующий цвет маскирующего агента на металлическую поверхность перед тем, как подвергнуть каждый слой фотополимеризации в течение 20 секунд.
6. В случае использования реставрационного вещества подвергнуть его полимеризации и финишной обработке в соответствии с руководством пользователя соответствующего реставрационного вещества.

[Цементирование керамики и адгезия вещества для не прямой реставрации]

1. Удалив временный реставрационный материал, тщательно очистите реставрируемый участок пемзой и водой. При необходимости, проведите примерку для оценки уместности и оттенка и т.д.
2. После кислотной обработки эмали и дентина с помощью средства для травления зубов кислотой (DiaEtch) смойте гель для травления водой и осторожно высушите их в течение 1-2 секунд, чтобы удалить излишнюю влагу с области процедуры. В это время не забудьте оставить небольшое количество влаги на области процедуры. (Сушите зубы только до слегка влажного состояния, чтобы избежать чрезмерного высыхания, так как это может стать причиной снижения прочности сцепления.)
3. Нанесите 2 капли клея DiaPlus в емкость для смешивания и смочите кончик кисти достаточным количеством клея, чтобы дважды покрыть зону процедуры, и подождите 10 секунд после нанесения.
Слегка высушите в течение 2 ~ 5 секунд, чтобы испарился летучий растворитель (если на поверхности зоны процедуры нет блеска, нанесите бонд, повторив описанные выше процедуры), прежде чем полимеризовать в течение 20 секунд (если интенсивность света мощность светового облучателя менее 400 мВт / см², увеличьте период светового излучения).
4. После нанесения силана на внутреннюю поверхность реставрационного материала, обработанного кислотой или пескоструйной очисткой, дайте ему высохнуть (в случае композита примените обработку герметиком при необходимости).
5. Нанесите кистью на область, обработанную герметиком, бонд DiaPlus один раз.
6. Выпарите летучий растворитель бонда DiaPlus. Нет необходимости в фотополимеризации.
7. Хорошо перемешав цемент двойной полимеризации с соответствующим оттенком, нанесите его на внутреннюю поверхность реставрации. Излишки цемента легко удалить, если использовать частичное затвердевание (примерно 2-3 секунды).
8. Соблюдайте инструкции производителя по нанесению и полимеризации реставрационного вещества.

[Герметизация гиперчувствительных областей]

1. Очистите гиперчувствительную область пемзой и слегка высушите ее.
2. После кислотной обработки эмали и дентина с помощью кислотного средства для травления зубов (DiaEtch) смойте гель для травления водой и осторожно высушите их в течение 1-2 секунд, чтобы удалить излишнюю влагу с области процедуры. В это время не забудьте оставить небольшое количество влаги на области процедуры. (Сушите зубы только до слегка влажного состояния, чтобы избежать чрезмерного высыхания, поскольку это может стать причиной ухудшения адгезионной прочности.)
3. Нанесите 2 капли бонда DiaPlus в емкость для смешивания и смочите кончик кисти достаточным количеством адгезива, чтобы дважды покрыть зону процедуры, и подождите 10 секунд после нанесения.
Слегка просушите в течение 2 ~ 5 секунд, чтобы испарился летучий растворитель (если на поверхности области процедуры нет блеска, нанесите бонд, повторяя описанные выше процедуры) перед засвечиванием в течение 20 секунд.

С. Хранение и управление после использования

- Неправильное хранение продукта может вызвать ухудшение характеристик и сократить срок годности продукта.

- 1) Избегайте высоких температур и прямых солнечных лучей.
- 2) Храните его в сухом и прохладном месте (хранить при комнатной температуре от 2 ° C до 27 ° C).
- 3) Не хранить в непосредственной близости от продукта, содержащего эвгенол.
- 4) Поскольку это продукт с летучестью (содержит ингредиент этанол), не забудьте плотно закрыть крышку сразу после использования.
- 5) Храните в недоступном для детей месте.
- 6) Не хранить рядом с огнем.

Предостережения

А. Противопоказания

- 1) Этот продукт содержит вещество, которое может вызвать аллергию в зависимости от человека при контакте с кожей. Не используйте этот продукт у пациентов с аллергией на акрилат.

Б. Общие меры предосторожности

- 1) Его должен использовать стоматолог или стоматологический-специалист, соблюдая методику нанесения и меры предосторожности.
- 2) Использование продукта для целей, отличных от предписанной цели использования, запрещено.
- 3) Не может быть назначен для внутреннего применения.

С. Взаимодействие

- 1) Предполагается, что стоматологическое устройство для фотополимеризации использовалось во время использования бонда DiaPlus. Соответствие выходящего света из устройства для фотополимеризации необходимо часто проверять с помощью надежного устройства для измерения мощности света.


Д. Меры предосторожности при использовании

- 1) При использовании продукта рекомендуется надевать защитные перчатки.
- 2) Не используйте товар с истекшим сроком годности.
- 3) Примите меры предосторожности, чтобы избежать контакта с продуктом, который не затвердел. При попадании на кожу достаточно смыть водой с мылом.
- 4) Процесс травления эмали и дентина включен в использование бонда DiaPlus. Удалите излишки влаги с зубов после удаления протравливающего средства промоканием.
- 5) Если он находился в контакте с мягкими тканями ротовой полости в течение длительного времени, смойте большим количеством воды. Если есть аллергическая реакция, пройдите осмотр у врача и, при необходимости, удалите продукт и в дальнейшем прекратите его использование.
- 6) Поскольку в зависимости от пациента возможно проявление временной послеоперационной чувствительности, используйте продукт только после консультации со стоматологом.
- 7) Воздух, используемый во время сушки, не должен быть загрязнен маслом или водой.
- 8) Если содержимое продукта попадет в глаза или попадет на мягкие ткани ротовой полости, немедленно смыть большим количеством воды.
- 9) Не используйте его, смешивая с другим продуктом.

Срок годности

2 года со дня изготовления.

Символы

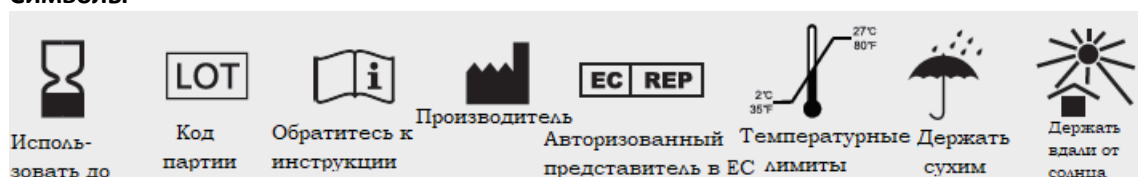

Гарантия

DiaDent Group International заменит продукт, если будет доказано, что он неисправен.

DiaDent Group International не несет ответственности за любой ущерб или убытки, косвенно связанные с использованием или невозможностью использования описанного продукта.

Перед использованием пользователь должен определить пригодность продукта для использования по назначению. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с этим.

Эксклюзивный представитель в РБ – ЧУП «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»

г. Минск, ул. М. Танка, 20 – 205

Тел. (017) 374-87-14, факс: (017) 374-25-81

моб. (029) 660-46-16, (029) 660-46-10

E-mail: sales@younico.by, сайт: www.younico.by