

е-Temp инструкция по применению

Продукт

Временный пломбировочный материал для стандартных полостей и постэндодонтического лечения.

Состав

- ◆ Оксид цинка
- ◆ Глицерин
- ◆ Сульфат кальция
- ◆ Сульфат цинка

Применение

- Временные реставрации, особенно отпрепарированных под вкладки.
- Временное пломбирование и запечатывание.
- Временное пломбирование ложки импланта.

Инструкция по использованию

1. Изолируйте участок с помощью коффердама.
2. Очистите и высушите полость канала.
3. С помощью подходящего инструмента заполните полость необходимым количеством.
4. Завершить и уплотнить начинку. В случае окклюзионных полостей проверьте высоту после подтверждения окклюзии.
5. Проверьте окклюзию и удалите излишки материала с поверхности подходящим инструментом.
6. е-Temp затвердеет за 25 минут, впитав влагу во рту и слюну. Избегайте воздействия жевательного давления в течение примерно 2 часов после нанесения.

Примечание:

- Не смешивайте и не загрязняйте е-Temp с каким-либо другим материалом.
- При удалении пломбы очистите полость ватным тампоном, пропитанным спиртом.

Хранение

- 1) Из-за чувствительности к влаге закрывайте банку сразу после использования.
- 2) Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- 3) Храните продукт в сухом месте при комнатной температуре.
- 4) Срок годности: 2 года

Предостережения

- 1) Для использования только профессиональным стоматологом по назначению.
- 2) Не используйте для пациентов с признаками аллергии или инфекции.
- 3) Избегайте прямого контакта с глазами или кожей при использовании е-Temp. В случае контакта промойте проточной водой и проконсультируйтесь с врачом.
- 4) Не использовать по истечении срока годности.
- 5) Избегайте контакта с водой или влагой.

Упаковка

е-Temp Kit (30г) Белый (2004-1001)

Символы



Гарантия и ограничение ответственности

DiaDent Group International заменит продукт, в котором будет доказано, что имеется брак.

DiaDent Group International не несет ответственности за любой или меньший ущерб, прямой или косвенный, связанный с использованием или невозможностью использования описанного продукта.

Перед использованием пользователь должен определить пригодность продукта для использования по назначению. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с этим.

Европейское Представительство

DiaDent Europe B.V.

Антенестраат 70, 1322AC

Алмере, Нидерланды Tel: 00 31 (0)36 549 8607 FAX: 00 31 (0)36 536 7317

Эксклюзивный представитель в РБ – ЧУП «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»

г. Минск, ул. М. Танка, 20 – 205

Тел. (017) 374-87-14, факс: (017) 374-25-81

моб. (029) 660-46-16, (029) 660-46-10

E-mail: sales@younico.by, сайт: www.younico.by