

## Dia-ROOT BIO Sealer инструкция по применению

### Показания к применению

DIA-ROOT BIO Sealer - это силер для корневых каналов на основе МТА (заполнителя минерального триоксида), который обеспечивает полную и постоянную герметизацию корневых каналов. Его можно использовать с материалами для obturation корневых каналов или без них.

### Инструкции

#### А. Меры предосторожности перед использованием

- 1) Перед использованием продукта проверьте продукт на предмет отклонений, срока годности и наличия посторонних веществ, примесей и изменений продукта.
- 2) Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению.
- 3) Перед процедурой необходимо надеть подходящую защитную одежду, защитные очки и перчатки.

#### Б. Инструкции по применению

- 1) Подготовьте и промойте корневой канал стандартными эндодонтическими методами.
- 2) Вставьте одноразовый наконечник в шприц и вставьте его в корневой канал.
- 3) Заполните корневой канал, медленно нажимая на поршень, чтобы выдавить материал в канал. Будьте осторожны, не прилагайте слишком больших усилий, так как это может привести к образованию пузырей и/или переполнению.
- 4) При использовании гуттаперчевого штифта, вставьте его в корневой канал.
- 5) Отрежьте верхушку стоматологическим инструментом. Излишки продукта можно удалить с помощью ватного диска или ватного шарика, смоченного водой.

#### С. Хранение и действия после использования

- 1) После процедуры снимите и утилизируйте одноразовый наконечник. Замените одноразовый наконечник и закройте продукт силиконовым колпачком.
- 2) Запечатать в алюминиевый пакет и хранить в сухом месте (15-25°C, относительная влажность менее 60%).

### Предостережения

#### А. Предостережения

- 1) Этот продукт должен использоваться только профессиональным стоматологом, при этом необходимо тщательно соблюдать инструкции по применению и меры предосторожности.
- 2) Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае контакта немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- 3) Не позволяйте детям и пожилым людям прикасаться к изделию.

#### Б. Общие меры предосторожности

- 1) Неправильное хранение может снизить эффективность и срок годности продукта.
- 2) Не используйте этот продукт для каких-либо иных целей, кроме его предполагаемого назначения.
- 3) Если содержимое продукта попало в глаза, немедленно промойте большим количеством воды.
- 4) Не использовать продукт по истечении срока годности.
- 5) Не храните и не используйте содержимое в каких-либо других контейнерах, кроме предоставленных производителем.

#### С. Противопоказания

- 1) Не используйте для других целей, кроме пломбирования корневого канала в стоматологических целях.
- 2) Не используйте продукт у пациентов с зарегистрированной чувствительностью к любому из его компонентов.

#### Д. Меры предосторожности при применении

- 1) Перед процедурой в ротовой полости пациента необходимо использовать коффердам.
- 2) Не выдавливайте материал с чрезмерной силой, иначе пациент может почувствовать острую боль.
- 3) Не выводите за апекс. Переполнение может вызвать боль у пациента.
- 4) Избегайте контакта с водой не по назначению, поскольку материал затвердевает при контакте с водой.

- 5) Продукт следует хранить в запечатанном контейнере до использования, чтобы предотвратить предварительную реакцию из-за влаги в атмосфере.
- 6) Используйте с осторожностью, так как при взаимодействии с влагой pH повышается до 10-12.
- 7) Не используйте одноразовые наконечники повторно.
- 8) Этот продукт предназначен для постоянного пребывания в зубе более 30 дней.

### Срок годности

2 года с даты изготовления при соблюдении инструкций по хранению.

### Символы



### Гарантия и ограничение ответственности

DiaDent Group International заменит продукт, если будет доказано, что он неисправен. DiaDent Group International не несет ответственности за любой ущерб или убытки, прямые или косвенные использования, или невозможности использования описанного продукта. Перед использованием пользователь должен определить пригодность продукта для использования по назначению. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с этим.

### Эксклюзивный представитель в РБ – ЧУП «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»

г. Минск, ул. М. Танка, 20 – 205  
Тел. (017) 374-87-14, факс: (017) 374-25-81  
моб. (029) 660-46-16, (029) 660-46-10  
E-mail: [sales@younico.by](mailto:sales@younico.by), сайт: [www.younico.by](http://www.younico.by)