

Dia-Proseal инструкция по применению

ТОВАР

DIA-PROSEAL используется для окончательной герметичной obturation корневых каналов постоянных зубов в сочетании с внутриканальными штифтами.

СОСТАВ

- | | |
|---|-------------------------|
| ◆ База | ◆ Катализатор |
| - Бисфенол А-ко-эпихлоргидрин | - Гексаметиленetetрамин |
| - Бисфенол-Ф эпоксидная смола
(Формальдегид, олигомерные продукты
реакции с 1-хлоро-2,3-эпоксипропаном и фенолом) | - Оксид циркония |
| - Оксид циркония | - Силиконы и силоксаны |
| - Силиконы и силоксаны | - Гидроксид кальция |
| - Оксид железа | - Вольфрамат кальция |
| - Гидроксид кальция | |

СВОЙСТВА

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Степень текучести: 17 мм и более | - Время схватывания: в пределах 6,5-7,5 часов. |
| - Толщина пленки: 50 мкм и менее | - Рентгеноконтрастность: 3 мм и более |
| - Растворимость: менее 3% | |

ПОКАЗАНИЯ

- 1) Перед использованием проверьте срок годности. Перед использованием проверьте, не содержит ли материал какие-либо примеси или мусор. Не используйте, если материал изменил цвет или затвердел.
- 2) Стоматологи должны внимательно прочитать руководство производителя перед использованием продукта.
- 3) Подготовьте все необходимые устройства и аксессуары перед тем, как приступить к процедуре.

Примечание 1.

ПОДГОТОВКА КОРНЕВОГО КАНАЛА

Перед применением DIA-PROSEAL тщательно очистите корневой канал. Если перексид водорода использовался для ирригации, важно убедиться, что в канале нет следов промывочного раствора. Это необходимо, чтобы избежать реакции с DIA-PROSEAL, которая может привести к образованию пузырьков. Если гипохлорит натрия и перексид водорода используются для ирригации каналов, используйте гипохлорит в качестве последнего средства.

Примечание 2.

Смолы DIA-PROSEAL смешиваются для получения материала для очистки корневых каналов с отличной герметизирующей способностью. Благодаря адаптации дозы к лункам корневого канала и очень небольшой усадке во время отверждения, DIA-PROSEAL позволяет плотно obturировать корневые каналы при отличной совместимости с тканями.

DIA-PROSEAL соответствует требованиям ISO 6876 к материалам для пломбирования межклеточных каналов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1) Изолируйте участок с помощью коффердама. Подготовьте и обработайте корневой канал.
- 2) Удалите весь деприс из корневого канала. Протезинфицируйте и очистите корневой канал раствором гипохлорита натрия или ЭДТА и полностью высушите.
- 3) Откройте предохранительный колпачок DIA-PROSEAL и выдавите основной материал (желтый) и катализатор (белый) в соотношении 1: 1 из двойного шприца на блокнот для смешивания (из-за разной вязкости базы и катализатора, они могут подаваться с различной скоростью).

4) Используя палочку для смешивания или металлический шпатель, смешивайте базу (желтый) и катализатор (белый) в течение 10-20 секунд, пока они полностью не смешаются и не приобретут цвет слоновой кости.

5) Измерьте длину корневого канала с помощью электронного апекслокатора или файла. Подберите соответствующий гуттаперчевый штифт. Нанесите и нанесите небольшое количество смеси на гуттаперчевый штифт (или серебряный штифт, или титановый штифт корневого канала) и медленно введите штифт по направлению к апексу. В качестве альтернативы стоматологи могут нанести смесь с помощью бумажного штифта, римера или наполнителя Dia-Spiral (каналонаполнителя). Чтобы предотвратить образование и захват пузырьков воздуха, а также переполнения канала, покрытые материалом штифты должны вводиться очень медленно по часовой стрелке во время obturation и извлекаться против часовой стрелки. Если используется каналонаполнитель, продвигайте и извлекайте каналонаполнитель медленно к апексу с очень низкой скоростью.

6) После завершения процедуры сделайте рентгеновский снимок, чтобы проверить печать.

ХРАНИЕНИЕ

- 1) После использования убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- 2) Избегайте попадания прямых солнечных лучей и храните при комнатной температуре в сухом месте.
- 3) Не хранить рядом с легковоспламеняющимися предметами.
- 4) Хранить в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ

◆ Предупреждения

- 1) Этот продукт должен использоваться только профессиональными стоматологами. Необходимо строго соблюдать инструкции и предостережения.
- 2) Этот продукт нельзя использовать пациентам с аллергией на какой-либо компонент продукта или пациентам, страдающим воспалением.
- 3) Этот продукт нельзя назначать для внутреннего использования/применения.
- 4) Установка коффердама необходима для защиты дыхательных путей перед процедурой.
- 5) Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае попадания на кожу немедленно удалите материал ватой и спиртом и тщательно промойте водой с мылом. В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
- 6) Не переполняйте корневой канал слишком большим количеством герметика, так как это может привести к повреждению периапикальной ткани.
- 7) Не глотайте. В случае случайного проглатывания дайте пациенту выпить много воды и обратитесь за медицинской помощью.
- 8) Не использовать по истечении срока годности.
- 9) Плотно дозируйте колпачок после каждого использования.

◆ Меры предосторожности во время процедуры

- 1) При смешивании базы и катализатора не нагревайте.
- 2) Не полимеризуйте смешанный материал (т. е. не используйте свет для полимеризации материала).
- 3) Не смешивайте с другими продуктами.

УПАКОВКА

НОМЕР # 1003-201

DIA-PROSEAL 16 г в двойном шприце, блокнот для замешивания, шпатель.

СИМВОЛЫ



СРОК ГОДНОСТИ

2 года с даты изготовления (при условии хранения в соответствии с рекомендациями)

ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

DiaDent Group International заменит продукт, в котором будет доказано, что он неисправен. DiaDent Group International не несет ответственности за любой или меньший ущерб, прямой или косвенный, связанный с использованием или невозможностью использования описанного продукта. Перед использованием пользователь должен определить пригодность продукта для использования по назначению. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с этим.

Европейский представитель

DiaDent Europe B.V.
Antennestraat 70, 1322AS
Алмере, Нидерланды

Эксклюзивный представитель в РБ – ЧУП «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»

г. Минск, ул. М. Танка, 20 – 205
Тел. (017) 374-87-14, факс: (017) 374-25-81
моб. (029) 660-46-16, (029) 660-46-10
E-mail: sales@younico.by, сайт: www.younico.by