

## Diapaste инструкция по применению

Diapaste - это паста из гидроксида кальция с сульфатом бария, используемая в качестве материала для временного пломбирования корневых каналов.

### Предполагаемое использование

Мазь на водной основе, временно заполняющая корневой канал при следующих показаниях:

- Апексификация
- Лечение инфицированного корневого канала
- Временное пломбирование корня
- Пломбирование корневых каналов молочных зубов
- Дезинфекция после экстирпации пульпы
- Витальная пульпотомия
- Временное покрытие пульпы

### Характеристики

- Антибактериальный
- Отличная рентгеноконтрастность.
- Заполнение микрополостей благодаря высокой текучести.
- Низкая токсичность и меньшая стимуляция апикальной ткани.
- Стабильный, так как не затвердевает и не расслаивается.
- Отличный доступ к апексу.
- Высокая биосовместимость с периапикальной тканью.

### Рекомендованное использование

- Подготовка перед использованием

1. Проверьте продукт на утечки, обесцвечивание, ненормальное состояние упаковки и срок годности.
2. Ко рту пациента прикрепляется коффердам для защиты полости рта и подготовки необходимых принадлежностей для процедуры.
3. Ознакомьтесь с предупреждениями, побочными эффектами, противопоказаниями и инструкциями.

- Как пользоваться

1. Откройте защитный колпачок и наденьте одноразовый наконечник на шприц.
2. Наконечник вставляется в отверстие корневого канала на 1/5 его длины.
3. Медленно и осторожно надавите на поршень, чтобы ввести содержимое в канал.
4. Удалите излишки материала из корневого канала и продолжите обычную процедуру реставрации.
5. После использования снимите одноразовый наконечник, прикрепленный к шприцу, и прикрепите новый одноразовый наконечник.
6. Закройте новый одноразовый наконечник прилагаемым силиконовым колпачком и полностью запечатайте его.

- Место хранения

1. При хранении плотно закрывайте силиконовый колпачок на новом одноразовом наконечнике.
2. Избегайте высокой температуры и высокой влажности.
3. Не хранить рядом с огнем.
4. Хранить в недоступном для детей месте.
5. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и храните в сухом прохладном месте. Температура хранения: 2 ~ 27

## Предостережения во время использования

### ● Общая осторожность

1. Этот продукт должен использоваться только стоматологом или стоматологическим специалистом.
2. Не используйте у пациентов с воспалениями или аллергией на какие-либо компоненты этого продукта.
3. Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае попадания немедленно промыть проточной водой.
4. Этот продукт не может быть назначен для внутреннего использования.
5. Этот пломбировочный материал должен оставаться в теле только 29 дней или МЕНЬШЕ.


### ● Примечание по применению

1. Не выдавливайте продукт за апекс.
2. Не используйте продукты с истекшим сроком годности.
3. Не смешивайте с другими продуктами.

## Срок годности

3 года со дня изготовления

## Символы

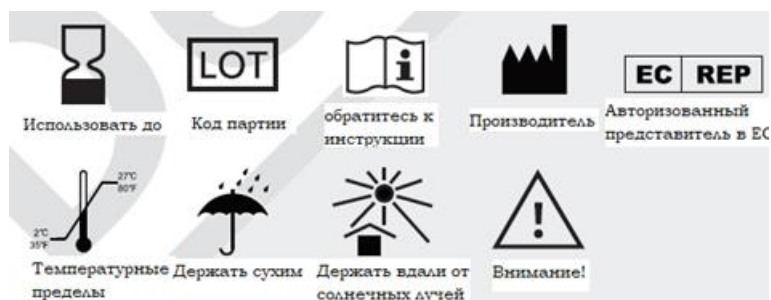

## Эксклюзивный представитель в РБ – ЧУП «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»

г. Минск, ул. М. Танка, 20 – 205

Тел. (017) 374-87-14, факс: (017) 374-25-81

моб. (029) 660-46-16, (029) 660-46-10

E-mail: [sales@younico.by](mailto:sales@younico.by), сайт: [www.younico.by](http://www.younico.by)