

DiaDent DiaPrep Pro инструкция по применению

DiaDent DiaPrep Pro - крем ЭДТА с перекисью водорода мочевины, используемый в качестве ирригационного средства для химикомеханической обработки корневого канала.

Показания (применение совместно с гипохлоритом натрия)

- Удаление деприва в корневом канале
- Растворение остатков пульпы
- Удаление смазанного слоя
- Облегчение движения эндодонтических инструментов
- Микробицидная обработка внутри канала
- Очистка дентинных канальцев и апикальной области

Состав

- Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА)
- Перекись водорода мочевины (УНР)

Преимущества и эффективность

- ЭДТА удаляет смазанный слой, смягчает дентин и облегчает удаление кальцифицирующей обструкции
- УНР реагирует с гипохлоритом натрия с образованием пузырьков кислорода, которые вымывают мусор из канала
- Смазочная среда облегчает движение инструмента по каналу, чтобы избежать его блокировки или поломки.
- Открытые дентинные канальцы и апикальная область обеспечивают лучшее проникновение лекарственных препаратов и пломб в корневые каналы.

Применение

1. Изолируйте зуб, который нужно лечить, с помощью коффердама.
2. Откройте и очистите пульповую камеру обычным способом.
3. Введите достаточное количество DiaPrep Pro в пульповую камеру или нанесите DiaPrep Pro прямо на инструмент для обработки канала.
4. Обработайте корневой канал обычным способом.
5. При необходимости промойте корневой канал раствором гипохлорита натрия.
6. Повторяйте шаги 3–5, пока канал не примет нужную форму и не очистится.


Меры предосторожности

- Только для стоматологического использования
- Избегайте выталкивания излишков пасты из апекса
- Рекомендуются защитные перчатки.
- В случае случайного контакта с глазами или продолжительного воздействия на ткани полости рта немедленно промойте большим количеством воды.
- Не использовать по истечении срока годности.

Место хранения

- Хранить в сухом и прохладном месте.
- Держите крышку плотно закрытой после каждого использования
- Срок годности 2 года.

Символы

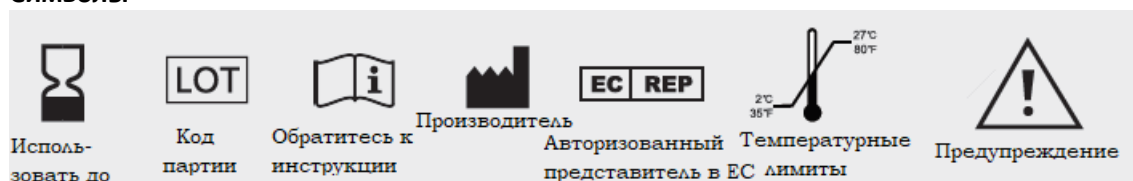

Гарантия

DiaDent заменит продукт, который оказался неисправным. DiaDent не несет ответственности за любые убытки или убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования или невозможности использования описанного продукта.

Перед использованием. Пользователь несет ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению.

Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с этим.

Эксклюзивный представитель в РБ – ЧУП «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»

г. Минск, ул. М. Танка, 20 – 205

Тел. (017) 374-87-14, факс: (017) 374-25-81

моб. (029) 660-46-16, (029) 660-46-10

E-mail: sales@younico.by, сайт: www.younico.by